



MIKROBIOLOGISKE PRØVER VED PERIODONTITT

Prøvetaking og forsendelse

For å sikre riktig kvalitet på den mikrobiologiske analysen, er det viktig at prøven blir tatt og innsendt til laboratoriet på rett måte. Flere av bakteriene er anaerobe og kan derfor dø under transport om luft slipper til. Prøver til bakteriologisk analyse må derfor sendes på eget transportmedium som fås gratis fra as Telelab.

Prøvetaking.

- Tørk vekk fuktighet i prøvetakingsområdet
- Stikk en steril papirpointer (bruk steril pinsett) ned i tannlommen som holdes der i 15 sekunder. Ta minst 3 pointere fra hver lomme
- Deretter stikkes pointeren **så langt som mulig ned i transportrøret**. Dette er viktig for å hindre lufttilgang.
- Ved større abcesser eller ved overfladiske infeksjoner i munnhulen benyttes en bomullspinne som stikkes ned i abcessen/sårområdet. Bomullspinnen stikkes deretter helt ned i bunnen av transportrøret. Penselen knekkes ved kanten av prøverøret og korken skruses på.
- Merk prøverøret med navn og fødselsdata.

Forsendelse.

Unilabs Telelab leverer ut gratis både transportcontainer og konvolutt.

- Prøveglasset legges i egen transportcontainer som igjen legges i egen konvolutt merket **Biologisk materiale**.
- En remisse med pasientens navn, fødselsdata, bostedsfylke (om norsk pasient) og nasjonalitet (om utenlands statsborger) fylles ut og sendes med prøven. Kliniske opplysninger er viktig for korrekt behandling av prøven i laboratoriet.
- Prøven sendes så raskt som mulig til as Unilabs Telelab. Unilabs Telelab har lørdagsåpent slik at prøver kan postlegges fredager.